

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ORMED

Flex-F03

Подготовка к проведению процедуры

Настройка аппарата для правой/левой руки
*при необходимости.



Включите аппарат в сеть и нажмите кнопку ON/OFF. Дождитесь полной загрузки.



В меню установок мотора В используйте функцию «выбор правой/левой конечности». Аппарат переместится в положение для перемены руки.



Поменяйте местами подлокотник и исполнительный механизм. Переместите опору плеча на 180° таким образом, чтобы она оказалась со стороны кресла. Выдвиньте мотор В до упора и переверните его на 180° таким образом, чтобы он оказался со стороны кресла. Задвиньте мотор В на необходимую глубину.



Подстройка аппарата под длину предплечья пациента.



Придерживая аппарат, ослабьте фиксатор длины предплечья и выдвиньте мотор В. Зафиксируйте ладонь передним, а запястье - задним ремнем.



Система скольжения опоры кисти должна иметь возможность скользить в обоих направлениях минимум на 2 см. Пальцы должны иметь достаточно свободного места до мотора В.



Отрегулируйте высоту стойки. Запишите параметр в карту пациента.



Поверните исполнительный механизм на необходимый угол.



Настройте подлокотник для комфорtnого размещения здоровой руки.

Подстройка оси разгибания/сгибания локтевого сустава.

Важно! При несовпадении осей разработка будет проходить неверно и может повлечь ухудшение состояния.



Ослабив ремни, совместите ось локтевого сустава с осью мотора А в вертикальной плоскости. С помощью фиксатора, отрегулируйте угол положения плеча.



Вращением опоры плеча добейтесь совмещения оси локтевого сустава с осью мотора А в горизонтальной плоскости.




Двигая опору кисти, сместите ось пронации/супинации на требуемый эксцентрикитет относительно оси мотора В.



Вращением опоры плеча отрегулируйте положение таким образом, чтобы не допустить изгиба запястья.


Настройка значений пульта управления

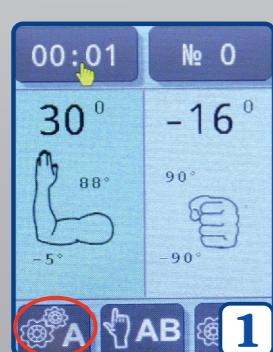


На пульте управления выберите меню установок мотора А.




Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки для мотора А. При необходимости данный мотор можно отключить.

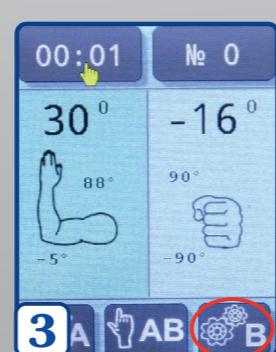

На пульте управления выберите меню установок мотора В.

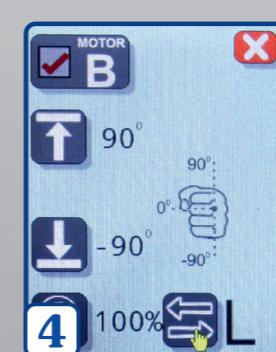


Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки для мотора В. При необходимости данный мотор можно отключить.

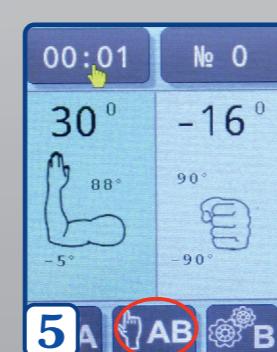


На пульте управления выберите меню настройки процедур. Здесь вы можете выбрать специальный режим.



Специальные режимы подробно описаны в руководстве по эксплуатации.

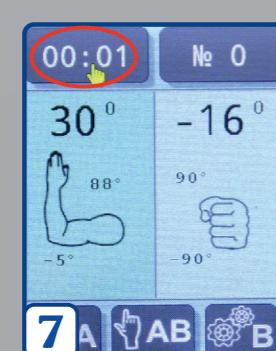

В основном меню задайте время процедуры.

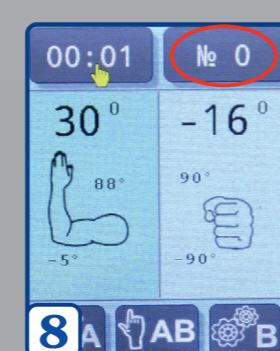

Выберите номер ячейки памяти и запишите его в карту пациента. В данной ячейке сохранятся последние настройки процедуры.



Наиболее удобный способ сохранения настроек процедур - индивидуальная flash-карта. Вставьте ее в гнездо перед началом процедуры и параметры сохранятся автоматически.



Переключение параметров осуществляется кнопками + и -, выбор функции - кнопкой OK, запуск процедуры - кнопкой ПУСК. Во время процедуры нажатие любой кнопки устанавливает аппарат на паузу.

ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ МЕХАНОТЕРАПЕТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ СУСТАВОВ, ТРАКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ, КИНЕЗИОТЕРАПИИ И РОЛИКОВОГО ВИБРОМАССАЖА СМОТРИТЕ НА: WWW.ORMED.RU