

# РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

**ORMED**  
Flex-F05

## Подготовка к проведению процедуры


### Настройка аппарата для разных терапевтических режимов.

\*Аппарат предназначен как для правой, так и для левой руки.

\*Важно! При несовпадении осей разработка будет происходить неверно и может повлечь ухудшение состояния!



Для установки аппарата в режим **сгибания/разгибания** водило устанавливается на ось мотора. Ручка располагается вертикально. Лоток необходимо отрегулировать по высоте так, чтобы не было сгиба запястья и зафиксировать. Ось сгиба кисти должна совпадать с осью мотора.

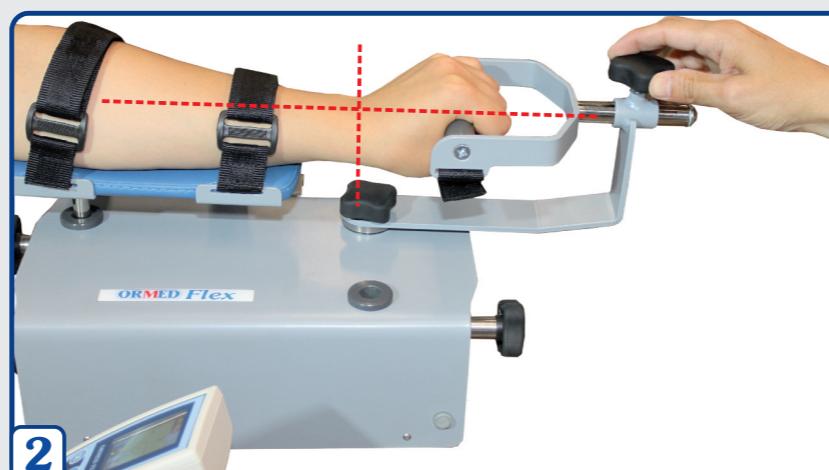

Для установки аппарата в режим **девиации** установить ручку в горизонтальное положение. Остальные положения исполнительных механизмов идентичны настройке аппарата для сгибания/разгибания.



Для установки аппарата в режим **пронации/супинации** необходимо снять составные части аппарата.



Установить стойку для пронации/супинации и зафиксировать.



Установить лоток предплечья, отрегулировать его по высоте.




Установить ручку на ось редуктора и зафиксировать.




Закрепить кисть и предплечье с помощью ленты-липучки.

### Настройка значений пульта управления

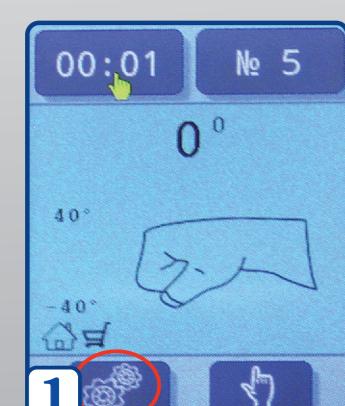

На пульте управления выберите меню установок мотора.

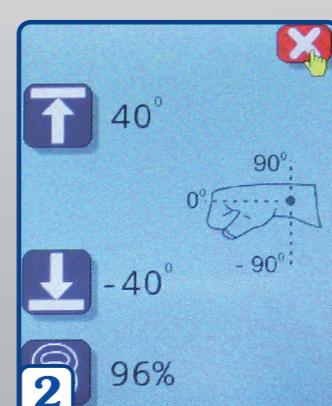


Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки.




В меню настройки процедуры вы можете выбрать специальный режим.



Специальные режимы подробно описаны в руководстве по эксплуатации.

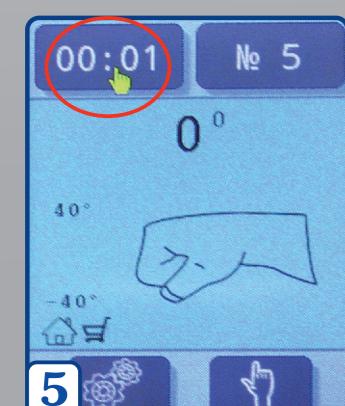

В основном меню задайте время процедуры.

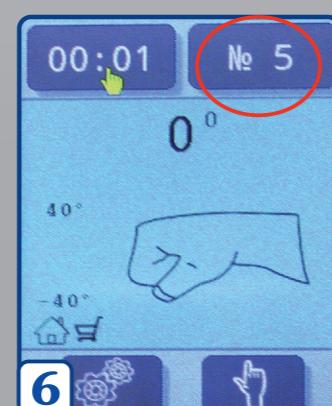

Выберите номер ячейки памяти и запишите его в карту пациента. В данной ячейке сохраняются последние настройки процедуры.



Наиболее удобный способ сохранения настроек процедуры - индивидуальная flash-карта. Вставьте ее в гнездо перед началом процедуры и параметры сохранятся автоматически.



Переключение параметров осуществляется кнопками + и -, выбор функции - кнопкой OK, запуск процедуры - кнопкой ПУСК. Во время процедуры нажатие любой кнопки устанавливает аппарат на паузу.